



Art.-Nr. 00556



Art.-Nr. DRS01436



Art.-Nr. DRS00662



Art.-Nr. 00556

# DESIFOR-ONE wipes

## Tuchspendersystem: DESIFOR-ONE wipes Spendereimer und DESIFOR-ONE wipes Vliestücher

### Einsatzbereich

Zur Verwendung bei kompatiblen DR.SCHNELL Desinfektionsprodukten auf nicht-porösen Oberflächen mit mechanischer Einwirkung in Krankenhäusern, in medizinischen Einrichtungen in Schulen, Kindergärten und Heimen sowie in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

### Anwendung



Handschuhe anziehen. Den Tuchspender vor der Wiederbefüllung auf sichtbare Verschmutzung hin überprüfen und gegebenenfalls säubern.



Vliestuchrolle, Deckel und Folienbeutel aus der Verpackung entnehmen und alle Bestandteile auf die Arbeitsfläche legen. **Hinweis: Das Etikett ist außen auf der Verpackung angebracht und der Folienbeutel und Spenderdeckel werden mit der Vliestuchrolle eingeschweißt.**



Folienbeutel in den Tuchspender einsetzen und über den Rand legen. **Hinweis: Der Folienbeutel dient dazu, dass die Desinfektionslösung später nicht mit dem Tuchspender in Kontakt kommt.**



Vliestuchrolle hineinstellen erstes Tuch entnehmen und durch die Deckelöffnung ziehen.



Die Vliestuchrolle mit 2,5 Liter Desinfektionsmittellösung tränken. Bitte beachten Sie die vorgegebene Anwendungskonzentration. Beispiel: Trinkwasser = 2475 ml und Desinfektion = 25 ml (1%)



Tuchspender mit dem Deckel verschließen (Drehbewegung nach rechts bis der Deckel einrastet). Nach 30 - 60 Min. ist die Vliestuchrolle vollständig durchtränkt und kann verwendet werden.



Das Etikett von der Verpackung abziehen und an die gewünschte Stelle am Tuchspender aufbringen und entsprechend beschriften. Die getränkte Vliestuchrolle kann 28 Tage verwendet werden ab dem Tag der Befüllung. Beispiel: 1 Mai = Tränkung der Vliestuchrolle, 28 Mai = letzter Tag der Verwendung



Nachdem die Vliestuchrolle aufgebraucht ist bzw. spätestens nach 28 Tagen Folienbeutel entnehmen, ggf. Flüssigkeit entsorgen, Beutel und Deckel verwerfen. **Hinweis: Nach Ablauf der 28 Tagen können die Vliestücher für die Desinfektion nicht mehr verwendet werden.**

### Produkteigenschaften

- Tuchrolle aus hochwertigen Vliestüchern (20 x 36 cm)
- Folienbeutel zur Vermeidung von Kontamination
- Einmaldeckel und Sicherheitsetikett zur Beschriftung
- Keine Aufbereitung des Spendereimers erforderlich
- Stabiler Spendereimer für 2 oder 2,5 Liter Desinfektionsmittel-Tränklösung

### Achtung

- Sollte kein neuer Folienbeutel und kein neuer Deckel verwendet werden, muss das System mit einem sporiziden Flächendesinfektionsmittel aufbereitet werden (DESIFOR PROTECT S mit 2% und 30 min.)!

### Technische Informationen

DESIFOR-ONE wipes Spendereimer Art.-Nr. DRS00662

DESIFOR-ONE wipes Vliestücher Art.-Nr. 00556

6 Rollen à 90 Tücher Art.-Nr. 00556

DESIFOR ONE ECONO WIPES Art.-Nr. DRS01436

Vliestücher 6 Rollen à 90 Tücher Art.-Nr. DRS01436

### DR.SCHNELL Desinfektionsprodukte

DESIFOR-ONE (0,5% oder 1%)\*

DESIFOR-forte AF neu (0,5% oder 2%)\*

DESIFOR-QUICK (100%)\*

\*Anwendungskonzentrationen beachten  
www.dr-schnell.com

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. © 1125

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München

Tel. +49 89 3506080

info@dr-schnell.de

www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL