

DESIFOR-ONE PROTECT

Verkaufseinheiten

Beutel à 20 g (Karton 50x20 g)

Art.-Nr.

20501



Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro-, und Adenoviren)
- Viruzid (inkl. Erreger der Hand-Fuß-Mund-Krankheit)
- Sporizid (inkl. C. difficile)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- VAH-gelistet
- IHO-gelistet
- HACCP-konform
- RKI-gelistet: Wirkungsbereich A/B



Anwendungsbereich

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im öffentlichen Bereich, Lebensmittelbereich und humanmedizinischen Bereich. Für den professionellen Bereich.

Anwendungsanleitung

Wasser in einem Eimer vorlegen, Pulver hineingeben und kurz umrühren. Beispielsweise 1 Beutel (20 g) auf 4 Liter Wasser = 0,5 % (5 g/l). Flächen feucht wischen. Auf vollständige Benetzung achten. Ausrüstung gut mit Wasser reinigen. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden.

Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	1 %	15 min	EN 16615 (niedrige Belastung) VAH (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid PLUS	0,5 %	5 min	EN 14476 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Viruzid	1 %	5 min	EN 14476 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Tuberkulozid (M. terrae)	2 %	60 min	EN 14348 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Sporizid (Clostridioides difficile)	1 %	120 min	EN 17126 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Fungizid	2 %	60 min	EN 13624 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Wirkungsbereich: RKI (A/B)	3 %	4 h	

Wirkstoffe

100 g enthalten 45 g Pentakalium bis(peroxymonosulfat) bis(sulfat)

BAuA Reg.-Nr. N-70788

CE 0297

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungshinweise

- Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch (aufgelöstes Pulver) 8 Stunden.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl und trocken, nicht über 30°C
- Lagerung: 18°C bis 25°C.
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung



Technische Informationen

Produktfarbe: Weiß
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

GIS-CODE: GD10

pH conc

2 4 6 8 10 12 14

Kennzeichnung



Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Enthält Dikaliumperoxodisulfat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/desifor-one-protect>

DE 251210