

DESIMATIC-S 3in1

Verkaufseinheiten

Kanister à 5 Liter

Art.-Nr.

DRS00642



Produkt Eigenschaften

- Exzellente Trocknungseigenschaften für alle Spülgut- und Materialarten, insbesondere bei Kunststoffteilen
- Schützt Steckbeckenspülen vor Verkalkung
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Schaumarm
- Frei von Duftstoffen
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

Anwendungsbereich

Flüssiger Klarspüler, Reiniger und Entkalker für die maschinelle Aufbereitung in thermisch arbeitenden Steckbeckenautomaten für die Aufbereitung von Urinflaschen, Saugflaschen und Einsatzkörbe mit Utensilien. Für den professionellen Bereich.

Anwendungsanleitung

Dosierung erfolgt automatisch und wird in Abhängigkeit von der ortsspezifischen Wasserhärte optimal eingestellt. Entsprechend den Empfehlungen der Gerätehersteller wird das Konzentrat an die Dosierpumpe angeschlossen. Überprüfung der Dosierung muss durch Auslitern sichergestellt werden. Die Verwendung von enthärtem Wasser verbessert die Produkteigenschaften und verringert den Produktverbrauch.

Weiches Wasser (bis 7°dH): 0,5ml - 1,0ml/ltr;

mittleres Wasser (7°dH - 15°dH): 1,5ml/ltr;

hartes Wasser (>15°dH): 2,0ml/ltr;

Einsatztemperatur: 30-90°C Einwirkzeit: 1-5min.

Anwendungshinweise

- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: 0°C bis 40°C
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet



Technische Informationen

Produktfarbe: Verschiedene

Dichte: 1,08 g/cm³

Enthält Duftstoffe: Nein

Enthält Farbstoffe: Nein

pH conc 0 4 6 8 10 12 14

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München

Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur

Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Kennzeichnung



Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/desimatic-s-3in1>

DE 260127

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülfingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



DR.SCHNELL