

FORMADES

SCHNELLEDESINFEKTION



praktisches Flowpack

begrenzt viruzid PLUS



PLUS PURE WIPES

Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen

- frei von Aldehyden
- gebrauchsfertige, getränkte Tücher
- auf allen alkoholbeständigen Oberflächen anzuwenden
- Tuchgröße: 20 x 30 cm
- besonders materialschonend, da geringer Alkoholanteil
- Medizinprodukt (D/A/CH)

Einsatzbereich

Als Medizinprodukt (D, CH): Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich, im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen.

Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit Fläche feucht halten. Das Flowpack nach der Nutzung wieder dicht verschließen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Bakterizid (hohe Belastung)	1 Min.	EN13727, EN1276, EN13697
Tuberkulozid / Mykobakterizid (hohe Belastung)	1 Min.	EN14348
Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Adeno- und Rota-Viren)	1 Min.	EN14476
Polyoma SV 40 (mit Belastung)	1 Min.	RKI/DVV

Wirkstoffe

100 g enthalten:
20,0 g 1-Propanol, 5g 2-Propanol

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):
Achtung; GHS02, GHS07

Hinweise

Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen.

Haltbarkeit geöffnet: 28 Tage
Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett

Gebinde	Inhalt	VE	Art.Nr.	PZN
Flowpack	80 Tücher (20 x 30 cm)	12 x 80	65703CH	16928997

*Tränkflüssigkeit Plus Pure VAH gelistet

UFI: WW0U-0X2W-W109-C3GY

BAuA-Reg. Nr. N-81830

pH 0 2 4 6 8 10 12 14

CE 0124 MD

Stand 01/2022

Alle Angaben unserer Produktdatenblätter entsprechen unserem besten Wissen.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
Weitere Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Vertrieb durch:

D: unizell Medicaire GmbH
Pohnsdorfer Str. 3
23611 Bad Schwartau

Telefon: 0451 - 39 89 00
Telefax: 0451 - 39 39 93
E-mail: info@unizell.de

CH: Praximedico AG
Bleichelstraße 22
9055 Bühler AR

PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
64653 Lorsch
Tel.: +49 (0) 6251 866980-0