

# Milibac N

## Verkaufseinheiten

Flasche à 1 Liter

Kanister à 10 Liter

## Art.-Nr.

00323

30092



## Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- HACCP-konform
- Geprüft und geeignet für Epoxidharzfugen



## Anwendungsbereich

Zur Desinfektion säurebeständiger Flächen im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Industrie und öffentliche Einrichtungen (Sanitärbereich, Schwimmbad, Wellness). MILIBAC N entfernt mineralische und organische Verschmutzungen. Für den professionellen Bereich.

## Anwendungsanleitung

Fläche mit - Anwendungslösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Anwendungsbeispiel für 1 Liter einer 2%igen Lösung: 980 ml Wasser vorlegen und 20 ml Produkt zugeben.

## Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	2 %	15 min	EN 13697 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	2 %	5 min	EN 14476 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Polyomaviren (SV 40)	2 %	5 min	EN 14476 (niedrige Belastung)

## Wirkstoffe

100 g enthalten 5,6 g Milchsäure; 3,0 g Ethanol

BAuA Reg.-Nr. N-84501

BAG Reg.-Nr. CHZN6347

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Anwendungshinweise

- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
- Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 3 Jahre.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

**Umgangshinweise**

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: 5°C bis 35°C
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet

**Technische Informationen**

Produktfarbe: Farblos  
Enthält Duftstoffe: Ja

Dichte: 1,12 g/ml  
GISCODE: GDO

pH conc 

2	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

**Kennzeichnung****Gefahr**

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/milibac-n>

DE 250412