



# DESIFOR- QUICK PLUS *wipes*

## Tücher zur Schnelldesinfektion

### Einsatzbereich

Gebrauchsfertige, alkoholische Tücher zur rückstandsfreien Schnelldesinfektion aller Bereiche in medizinischen Einrichtungen, für die Lebensmittelindustrie, Küchen und Gastronomiebetriebe (z. B. Tische). Gem. MPG: Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen nichtinvasiven Medizinprodukten. Gem. Biozidprodukte-VO: Zur reinigenden Schnelldesinfektion von alkoholbeständigem medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Aufgrund der parfüm- und rückstandsfreien Formulierung besonders gut geeignet für Lebensmittelindustrie, Küchen und Küchenbereiche in medizinischen Einrichtungen.

### Anwendung

Flächen, Inventar, Gegenstände mit DESIFOR-QUICK PLUS WIPES sorgfältig abreiben – Einwirkzeiten beachten.

Nachfüllen Dose: Deckel der Spenderdose abnehmen. Nachfüllbeutel 120er Pack öffnen, aus diesem Beutel eine Rolle formen und Beutel inkl. Inhalt in die Spenderdose gleiten lassen. Aus der Rollenmitte das erste Tuch durch die Öffnung im Deckel der Spenderdose ziehen und Deckel wieder auf die Dose setzen. Nach Anbruch Tücher baldmöglichst verbrauchen.

### Wirkungsspektrum DESIFOR-QUICK PLUS:

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/ Einwirkzeit	Anmerkung
Humanmedizinischer Bereich: VAH-Liste, ohne Mechanik, hohe Belastung, Bakterizidie und levurozidie	konz. 5 Min.	lt. Gutachten wirksam nach 1 Min.
Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen: bakterizid u. levurozid (EN 1276, EN 1650, EN 13697)	konz. 1 Min.	20 °C hohe u. niedrige Belastung
Tuberkulose-Bakterien (M. Terrae)	konz. 30 Sek.	gem. EN 14348, niedrige Belastung
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 30 Sek.	gem. DVV-/RKHeitlinie 08/2008
Noroviren (MNV)	konz. 1 Min.	gem. EN 14476
Rotaviren	konz. 30 Sek.	gem. EN 14476

### Produkteigenschaften

- Bietet alle Vorzüge des Wirkungsspektrums von DESIFOR-QUICK PLUS
- Ohne Farb- und Duftstoffe, bestens für sensible Bereiche und die Lebensmittelindustrie geeignet
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung für DESIFOR-QUICK PLUS liegt vor
- Rückstandsfreie Schnelldesinfektion
- Praktische Dose zur Einzeltuchentnahme
- Ökonomische Nachfüllbeutel (120er Pack für Dose)
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

### Hinweis

Leichtentzündlich. Behälter dicht verschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Gebrauchte Tücher fachgerecht entsorgen, nicht in die WC-Schüssel werfen.

### Technische Informationen

Karton mit 12 Dosen  
à 120 Tücher (120er Pack) Art.-Nr. 20554  
Karton mit 12 Nachfüllbeutel  
à 120 Tücher (120er Pack) Art.-Nr. 20553

### Wirkstoffe

100 g Tränkflüssigkeit DESIFOR-QUICK PLUS enthält  
45,0 g Ethanol

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008  
(CLP): Achtung; GHS02

Baua Reg.-Nr. N-35553; N-35554  
CHZN1999

CE 0482

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch  
stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten  
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann  
daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen  
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0318

pH conc 0 2 4 8 10 12 14

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taufstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE